

PALUN LUGEGE SEE TÄHELPANELIKULT LÄBI JA SÄILITAGE HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

ReNu MultiPlus®

Multifunktsionaalne lahus

KASUTUSJUHISED: Läätsede igapäevaseks puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja neilt proteiinide eemaldamiseks toimige järgmiste juhiste järgi.

1. ETAPP: Pange läätsespinna mõlemale küljele 3 tilka mitmeotstarbelist lahust ReNu MultiPlus ja hõõruge ettevaatlikult 20 sekundit.

2. ETAPP: Loputage lääts mõlemat külge 5 sekundi vältel põhjalikult multifunktsionaalse lahusega ReNu MultiPlus.

3. ETAPP: Asetage puhastatud kontaktlääts läätsesümbrisesse ja täitke ümbris värske mitmeotstarbelise lahusega ReNu MultiPlus. Leotage neid vähemalt 4 tundi. Ärge unustage alati kasutada värsket lahust. Teie läätsed on nüüd kandmiseks valmis. Soolalahusega ei ole tarvis loputada. Kui kontaktläätsedele jääb endiselt võõrkehi, loputage läätsi enne silmapanekut mitmeotstarbelise lahusega ReNu.

Järgige alati oma silmaarsti juhiseid. Olenevalt teie pisarate keemilisest koostisest ja läätsede kandmise sagedusest võib silmaarst soovitada lisatooteid või -protseduure.

SÄILITAMINE: Võite läätsi kuni kandmiseni avamata läätsesümbrises hoida maksimaalselt 30 päeva.

SISU: Steriilne isotooniline lahus, mis sisaldab 0,03% ainet HYDRANATE® (hüdrosüalalküülfosfonaat), boorhapet, dinaatriumedetaati, 1% poloksamiini, naatriumboraati ja naatriumkloriidi; konserveeritud 0,0001% ainega DYMED™ (polüaminopropüülbiguaniid).

TOIME:

Puhastab, vabastab ja eemaldab pehmetelt kontaktläätsedelt neile kogunenud kilet, proteiine, muid ladestusi ja võõrkehi. Hävitab läätses pinnal olevaid kahjulikke mikroorganisme. Loputab, säilitab ja niisutab läätsi enne silma panemist.

NÄIDUSTUSED (Kasutamine):

Multifunktsionaalne lahus **BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus®** on ette nähtud pehmete (hüdrofiilsete) kontaktläätsede igapäevaseks puhastamiseks, neilt proteiinijääkide eemaldamiseks, nende loputamiseks, keemiliseks (mitte kuumusega) desinfitseerimiseks ja säilitamiseks silmaarsti soovitusel kohaselt.

VASTUNÄIDUSTUSED (Põhjused, miks mitte kasutada):

Ärge kasutage toodet, kui olete selle koostisosadele allergiline.

HOIATUSED: PROBLEEMID KONTAKTLÄÄTSEDEGA JA LÄÄTSEHOOLDUSVAHENDITEGA VÕIVAD PÕHJUSTADA SARVKESTA INFEKTSIOONI JA/VÕI HAAVANDEID NING TAGAJÄRG VÕIB OLLA NÄGEMISE KADU (PIMEDAKSJÄÄMINE).

On hädavajalik, et järgiksite kõiki silmaarsti või optometristi ja pakendi juhiseid läätsede ja läätseshooldusvahendite, k.a läätsesümbrise, õige kasutamise kohta.

Silmaprobleemid, k.a sarvkesta haavandid, võivad areneda kiiresti ja põhjustada nägemise kadu (pimedaksjäämist). Päevase kandmise jaoks mõeldud läätsi ei tohi kanda ööpäev läbi ning neid ei tohi kanda magades. Kliinilised uuringud on näidanud tõsiste kõrvaltoimete ohu suurenemist, kui kanda neid läätsi ööpäev läbi. Pikaajalisi läätsi tuleks silmaarsti ettekirjutuste kohaselt regulaarselt silmadest eemaldada, et neid puhastada ja desinfitseerida. Samuti tuleks need silmaarsti ettekirjutuste kohaselt minema visata ja asendada. Kliinilised uuringud on näidanud, et pikaajalistel läätsedel on rohkem võimalikke tõsiseid kõrvaltoimeid kui päevastel läätsedel. Uuringud on ka näidanud, et tõsiste kõrvaltoimete oht on seda suurem, mida pikem on periood, mille järel pikaajalisi läätsi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks või minema viskamiseks ja asendamiseks silmast eemaldatakse. Lisaks on uuringud näidanud, et suitsetajatel esineb rohkem kõrvaltoimeid. Kui kogete silmade ebamugavustunnet, liigset

niiskust, nägemisteravuse muutumist ja/või silmade punetamist, eemaldage kohe läätsed silmadest ja võtke ühendust oma silmaarstiga. Lääts kandjatel on soovitatav käia silmaarsti juures kaks korda aastas, kui arst pole ette kirjutanud, et kontroll võiks toimuda veelgi tihemini.

LÄÄTSEDE LEOTAMINE JA SÄILITAMINE:

- Peaksite täitma läätsesümbrise värske lahusega, mitte lahust juurde valama või korduvalt kasutama, iga kord, kui oma läätsed sinna säilitamiseks asetate. Visake lahus minema kohe pärast läätsede eemaldamist läätsesümbrisest.
- Te ei tohiks lasta oma läätsedel veega, k.a kraani-, pudeli- või destilleeritud veega, või ükskõik millise mittesteriilse lahusega kokku puutuda ning neid selles säilitada või sellega loputada.

LÄÄTSEÜMBRISE HOOLDAMINE:

- Puhastage ja loputage läätsesümbrist mitmeotstarbelise lahusega ReNu MultiPlus iga kord, kui läätsed eemaldate, ning laske ümbrisel õhu käes kuivada. Et lubada liigsel lahusel ära voolata, võite oma läätsesümbrise kuivatamise ajal ümber pöörata.
- Vahetage läätsesümbrist tihti oma hügieeniharjumuste kohaselt.

HOIATUS:

- Iga kasutuskorra järel lahuse vahetamata jätmine, lahuse juurdevalamine või vee kasutamine läätsede hooldamiseks võib teie läätsi saastada ning põhjustada silmavigastusi ja potentsiaalselt ka nägemise kadumist.
- Läätsede piisavaks desinfitseerimiseks ja kontaktläätsede saastumise ohu vähendamiseks järgige tootesildil toodud soovitatavaid läätsede hõõrumis- ja loputusaegu. Lühema hõõrumis- või loputusaja korral ei pruugi läätsed piisavalt puhtaks saada.
- Läätsede desinfitseerimiseks ei tohi kasutada vett, füsioloogilist lahust ega silmatilku. Need lahused ei desinfitseeri läätsi. Kui soovitatud desinfitseerimisvahendit ei kasutata, võib tulemus olla raskekujuline infektsioon, nägemise kadu ja pimedaksjäämine.
- Ärge kasutage läätsede säilitamiseks või läätsesümbrise loputamiseks vett ega muud mittesteriilset lahust. Kasutage ainult värsket multifunktsionaalset lahust, et läätsi ja läätsesümbrist mitte saastada. Mittesteriilse lahuse kasutamine võib põhjustada raskekujulist infektsiooni, nägemise kaotust või pimedaksjäämist.
- Pärast äraviskamiskuupäeva multifunktsionaalse lahuse saastumise risk tõuseb ning lahuse kasutamise tulemus võib olla raskekujuline infektsioon, nägemise kadu või pimedaksjäämine.

TÄHTIS OHUTUSTEAVE:

- Järgige alati toote kasutusjuhiseid. Toote juhiste eiramine võib põhjustada nägemise kaotust (pimedaksjäämist).
- Külstage silmaarsti kaks korda aastas või vajaduse korral sagedamini.
- Enne läätsede käsitlemist peske ja kuivatage alati oma käsi.
- Ärge kasutage läätsedel või läätsesümbrises kraanivett, pudelivett või sülge.
- Kasutage kontaktläätsede puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ainult värsket lahust.
- Visake alati läätsesümbrisse jäänud lahus pärast iga desinfitseerimiskorda minema.
- Sülge või silmatilgad ei desinfitseeri teie läätsi.
- Asendage alati oma lahuseid, läätsi või läätsesümbrist juhiste järgi.
- Selleks et vältida saastumist, ärge laske millelgi pudeli otsa puudutada. Pärast lahuse kasutamist pange kork tagasi.
- Ärge kasutage selle lahusega koos silmaravimeid, välja arvatud arsti järelevalve all.
- Mitte kasutada kuumusega (termilise) desinfitseerimise jaoks.

ETTEVAATUSABINÕUD:

- Hoidke pudel tihedalt suletuna, kui seda parajasti ei kasuta
- Kasutage enne pakendile ja pudelile trükitud kõlblikkusaega
- Visake järelejäänud lahus 90 päeva jooksul pärast avamist minema
- Hoidke laste eest kättesaamatus kohas
- Säilitage toatemperatuuril

TÄHTIS: Kui tekib ärritus või liigne pisaravool, see püsib või suureneb või kui nägemine on halvenenud, lõpetage kasutamine ja pöörduge viivitamatult silmaarsti poole.

Kõrvaltoimed (probleemid ja lahendused):

Ilmneda võivad järgmised probleemid:

- Kipitus, põletustunne, sügelus (ärritus) või muu valu silmas
- Pärast lätse silma panemist aja jooksul tekkiv ebamugavustunne
- Tunne nagu miski oleks silmas (võõrkeha, sarvkestamarrastus)
- Tavalisest tugevam pisaravool (pisarad) või ebatavaline eritis silmast
- Silmade punetamine
- Vähenenud (halb) nägemisteravus
- Udune nägemine, vikerkaared või halod objektide ümber
- Valgustundlikkus (fotofoobia)
- Kuivad silmad

Kui märkate mõnda eelnimetatud, eemaldage kohe kontaktläätsed.

Kui ebamugavustunne või probleem lõpeb, vaadake läätsed hoolikalt üle.

- Kui lääts on vigastatud, ärge pange seda silma tagasi. Asetage lääts lätseümbrisesse ja võtke ühendust oma silmaarstiga.
- Kui leiate lätsest tolmu, silmaripsme vm võõrkeha või probleem kaob ja lääts tundub kahjustusteta, puhastage, loputage ja desinfitseerige lätse põhjalikult ja pange silma tagasi.

Kui probleem jätkub, eemaldage kohe lääts silmast ja võtke ühendust oma silmaarstiga.

Ülalnimetatud sümptomid võivad viidata tõsisele terviseprobleemile, näiteks infektsioonile, sarvkestahaavandile, uussoonestumisele või vikerkestapõletikule. Tõsiste silmavigastuste vältimiseks võtke kohe ühendust oma silmaarstiga, kes probleemi tuvastab ja ravi määrab. Kui külastate võimaliku silmainfektsiooni hindamiseks silmaarsti, võtke läätsed, lahused ja lätseümbris visiidile kaasa, et mis tahes mikroorganismide identiteet paremini kindlaks teha.

Eeskujulik lätsehooldus:

- Puhastage ja loputage oma käsi alati enne lätsede käsitlemist.
- Puhastage, loputage ja desinfitseerige oma läätsi iga kord pärast eemaldamist.
- Hooldage ja eemaldage läätsi silmast alati samas järjekorras, et vasak ja parem lääts ei läheks omavahel segi.
- Pärast kasutamist tühjendage alati lätseümbris ja loputage seda värske multifunktsionaalse lahusega ReNu MultiPlus ning laske ümbrisel õhu käes ära kuivada.

Pakendid ja mahud: Multifunktsionaalset lahust ReNu MultiPlus saab osta steriilsetes 60 ml, 120 ml, 240 ml ja 300 ml plastpudelites. Pudelid ja pakendid on märgistatud partii numbri ja kõlblikkusajaga.

Väljastamise kuupäev: 2021-05